

# Gebruiksaanwijzing

## Prothese

Inleiding

Eten, smaak en spreken

Draagcomfort

Dagelijks gebruik

Controle en herstel

Onderhoudsset

Garantie



## Inleiding

Uw gebitsprothese is met zorg en aandacht voor u op maat gemaakt. In de beginperiode vergt uw prothese vaak enige gewenning.

In de meeste gevallen lossen kleine problemen zich vanzelf weer op. In sommige gevallen is het raadzaam de tandarts of tandtechnicus te raadplegen. In deze brochure geven wij u informatie over hoe om te gaan met problemen en met onderhoud.

Volledige boven-  
en onderprothese



## Eten, smaak en spreken

U doet er in het begin verstandig aan voorzichtig en met kleine hapjes te kauwen. Eet eventueel zacht voedsel en kauw afwisselend links of rechts. De smaak kan in het begin iets veranderd zijn, echter dit herstelt zich na enige tijd vanzelf.

De speekselvorming kan door een nieuwe prothese gedurende een korte periode anders zijn dan u gewend was. Een drogere mond of juist vochtiger mond zijn verschijnselen die kunnen optreden. Na verloop van tijd lost dit zich vanzelf weer op. De spraak kan tijdelijk lastig zijn. Vooral de letters S, maar ook T en D kunnen in het begin problemen geven. Maar ook dit zal na enige gewenning en oefening na verloop van tijd beter gaan.

## Draagcomfort

Het eten met uw nieuwe prothese kan in het begin lastig zijn. De prothese geeft een vol gevoel en het tandvlees kan wat geïrriteerd raken. Mocht u echter klachten blijven houden, dan is een bezoek aan de tandarts of tandtechnicus noodzakelijk.

Deze kan door kleine correcties uit te voeren de problemen verhelpen. Slijpt of schuurt u nooit zelf aan uw prothese. Ondeskundige bewerkingen kunnen de problemen vergroten.

Partiële prothese



## Dagelijks gebruik

Voor uw kaken is het beter uw prothese 's nachts uit te doen. Uw kaken en tandvlees kunnen dan tot rust komen. Ook het slinken van de onderkaak wordt hierdoor vertraagd. Als u de prothese uit doet, bewaar deze dan in een bakje met koud water.



Prothese  
op implantaten

Net als bij natuurlijke tanden hechten zich voedselresten en bacteriën op uw gebitsprothese. Ook kan verkleuring door bijvoorbeeld koffie, thee, wijn, nicotine, enz. plaatsvinden. Het beste is dan ook dat u uw prothese na iedere maaltijd reinigt. Gebruik hiervoor een protheseborstel en (vloeibare) zeep of een prothese reinigingsmiddel. Gebruik nooit heet water of agressieve middelen, zoals bleekwater of vloeibaar schuurmiddel. Wanneer u de prothese boven de wastafel reinigt, zorg dan dat er een laagje water in de wasbak staat. Reinigen boven een handdoek kan ook. U voorkomt daarmee schade bij het vallen van de prothese.

U kunt uw kaken in conditie houden door deze na het schoonmaken van de prothese te masseren en te reinigen. Een zachte tandenborstel met een beetje tandpasta voor de smaak is hiervoor uitstekend geschikt. U bevordert hiermee de doorbloeding en gaat het slinken van de kaak tegen.

## Onderhoudsset

Voor het goed onderhouden van uw prothese is een onderhoudsset leverbaar. U krijgt zo'n setje bij aflevering van uw nieuwe prothese. Het setje is echter ook los verkrijgbaar.



# Controle en herstel

Uw prothese heeft een verantwoorde levensduur van vijf tot acht jaar. Dit kan echter per persoon verschillen. Zodra uw prothese los gaat zitten of pijn gaat doen is het verstandig een controle afspraak te maken.

Vaak is de pasvorm met een rebasing te herstellen. Laat uw prothese ieder jaar controleren. Lijm bij breuk een prothese nooit zelf. Dit kan een reparatie ernstig bemoeilijken en zeker kostbaarder maken. Ga voor aanpassing en reparaties naar uw tandarts of tandtechnicus.

## Garantie

Op uw nieuw gemaakte prothese geldt een garantietermijn van één jaar. Oorzaken van buitenaf of eigenhandige bewerkingen aan uw prothese en/of het gebruik van onjuiste reinigingsmiddelen of -methoden kunnen de garantietermijn doen verkorten of in het geheel doen vervallen.



Uw Prothese



Gebruiksaanwijzing Prothese



TCS Unbreakable Prothese

Uit deze reeks

### Dental Laboratorium Prummel BV

Schweitzerlaan 3

Postbus 26

T 050 526 81 81

W [www.dentalprummel.nl](http://www.dentalprummel.nl)

9728 NR Groningen

9700 AA Groningen

F 050 526 05 93

E [info@dentalprummel.nl](mailto:info@dentalprummel.nl)